

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Светильник медицинский СМ (далее по тексту – светильник) предназначен для использования в медицинских учреждениях (гинекологических, отоларингологических, урологических, процедурных и др. кабинетах).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питающей сети ~220В ± 10 В;
- частота 50 Гц;
- потребляемая мощность, не более 50 Вт;
- габаритные размеры: - высота, не более 1850мм, - диаметр основания 640мм;
- масса светильника, не более 5 кг;
- светильник предназначен для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С;
- срок службы не менее 10 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки светильника:

- светильник медицинский СМ – 1шт.
- руководство по эксплуатации ЛОДЭ-С .04.00.000 РЭ

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Светильник включайте в сеть с напряжением, не превышающим (220±22) В. Электророзетка должна соответствовать вилке светильника и обязательно иметь защитное заземление.
- 4.2 Все работы по ремонту, чистке светильника производите только после отключения его от сети.
- 4.3 Оберегайте шнур от повреждений. При повреждении шнура использование светильника не допустимо.

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 5.1 Вставьте вилку в розетку с источником переменного тока, розетка должна иметь защитное заземление.
- 5.2 Включите светильник, поставив переключатель в положении «ВКЛ».
- 5.3 С помощью гибкой дуги установите лампу светильника в положение, обеспечивающее оптимальное освещение.
- 5.4 После окончания работы, выключите светильник, установив переключатель в положение «ВЫКЛ». Отключите светильник от сети.
- 5.5 Общие указания:
 - предохраняйте светильник от ударов и падений;
 - предохраняйте сетевой шнур от повреждений.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник не требует специального технического обслуживания. При отсутствии свечения светодиодной лампы необходимо заменить ее.
Примечание: светильник медицинский экономичный СМ драгоценных металлов не содержит.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование светильника может производиться всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта.
- 7.2 Светильник может храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 10 до плюс 35°С.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника – 12 месяцев.
- 8.2 Гарантия не распространяется:
 - на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации.
 - на повреждения, вызванные использованием изделия в целях для которых не предназначено.
 - на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортировкой владельцем или торгующей организацией.
 - на повреждения, вызванные неправильным уходом.
 - на механические повреждения, причиненные потребителем.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Светильник медицинский СМ соответствует
ТУ ВУ 101263444.002-2008 изм. «3» и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Штамп ОТК _____

Дата продажи _____
Подпись продавца _____

Адрес предприятия-изготовителя:

220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого,140
ООО «ЛОДЭ-С»
Тел/факс: (8-017) 293 90 95

<https://WKmed.by/>
+375-29-612-93-03

СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ

Руководство по эксплуатации

Лодэ-С.04.00.000 РЭ

WKmed.by